

PROLONGATEUR DE REMPLISSAGE

► SYSTÈME DE REMPLISSAGE DES DIFFUSEURS À LARGE VOLUME

- Réduction du nombre de connexions / déconnexions
- Circuit clos aseptique
- Valve anti-retour évitant la manipulation du robinet (gain de temps)
- Aseptie de la purge grâce à l'obturateur avec filtre hydrophobe

MATÉRIEL NÉCESSAIRE POUR MONTAGE EN CIRCUIT CLOS

- 1 prolongateur de remplissage constitué des éléments pré-montés suivants :
 - un perforateur de poche ou de flacon, avec prise d'air
 - une tubulure 40 cm (sans DEHP)
 - un clamp
 - une valve anti-retour (verte)
 - un robinet 3 voies avec obturateurs
- 1 seringue 50-60ml (type BD-Plastipack)
- 1 diffuseur portable de petite ou grande capacité
- 1 poche de soluté médicamenteux



Prolongateur de remplissage
sans site d'injection



Seringue 50-60 ml



Diffuseur portable



Poche de soluté
médicamenteux

DÉSIGNATION DU PRODUIT	RÉFÉRENCES
Prolongateur de remplissage avec site d'injection	201742
Prolongateur de remplissage sans site d'injection	201741

Conditionnement: Carton de 100 unités
Dispositif médical de classe IIa

PROCÉDURE DE TRANSFERT DU MÉDICAMENT



En respectant les règles d'asepsie



1. PERFORATION DE LA POCHE

- Perforer la poche de soluté médicamenteux avec le perçant du prolongateur de remplissage. Ouvrir la prise d'air s'il s'agit d'un flacon de verre.



2. A) PURGE DE LA LIGNE

- Mettre le robinet en position «ouvert». **R** Les obturateurs du robinet doivent rester en place car celui muni d'un filtre de purge hydrophobe permettra l'échappement de l'air.



2. B) PURGE DE LA LIGNE

- Presser ou soulever la poche pour faire avancer le liquide jusqu'à remplir toute la tubulure et le robinet.



3. FERMETURE DES VOIES

- La purge terminée, tourner le robinet 3 voies de 45° afin de fermer toutes les voies.



4. CONNEXION DU DIFFUSEUR

- Retirer l'obturateur bleu du robinet 3 voies pour connecter le diffuseur portable.



5. FIXATION DU ROBINET

- Visser sur le site de remplissage du diffuseur en tournant la bague mobile du robinet, et non en tournant le diffuseur.



6. CONNEXION DE LA SERINGUE

- Retirer l'obturateur blanc du robinet 3 voies pour connecter la seringue.



7. FIXATION DE LA SERINGUE

- Visser la seringue sur le robinet 3 voies en tournant la seringue, et non le robinet.



8. OUVERTURE DU ROBINET

- Tourner le robinet 3 voies en position «ouvert».



9. REMPLISSAGE DE LA SERINGUE

- En maintenant les graduations de la seringue face à vous, remplir la seringue d'au maximum 50ml.



10. TRANSFERT DE LA SOLUTION

- Transférer la solution de la seringue vers le diffuseur. **R** Il est inutile de bouger la position du robinet car la valve anti-retour empêche la remontée vers la poche.



11. DÉCONNEXION DU DIFFUSEUR

- Le transfert terminé, clamer le prolongateur de remplissage puis déconnecter le diffuseur.



12. PROTECTION DU SITE

- Protéger le site de remplissage du diffuseur avec l'obturateur d'origine (qui aura été conservé aseptiquement).



DIFFUSEUR PORTABLE REMPLI

- Exemple de Dosi-Fuser 500ml rempli de soluté, tubulure purgée, prêt pour une perfusion.

R RÉPÉTER LES MANOEUVRES 9. ET 10. AUTANT DE FOIS QUE NÉCESSAIRE POUR OBTENIR LE REMPLISSAGE COMPLET DU DIFFUSEUR.

R OUVRIR L'OBTURATEUR DU DIFFUSEUR AFIN DE LE PURGER DE SON AIR AVANT CONNEXION AU PATIENT.

MEDI-GLOBE



Asept InMed

Essentiellement simple... et tout simplement Essentiel

9, Avenue Mercure - 31130 Quint Fonsegrives

+33 (0)5 62 57 69 00 +33 (0)5 62 57 69 01



SCANNEZ
POUR ACCÉDER AU
CONTENU EN LIGNE



DÉCOUVREZ NOTRE SITE SUR
www.aseptinmed.fr

